

zubaba



Sperm locker

zubaba车载精液储存箱说明书

JDF-3

感谢阁下回顾本公司产品，使用前敬请仔细阅读说明书！

Reed instriation manual carefully before use

简介

你选择了**zubaba 17°C车载精液储存箱**

该冰箱采用超厚的绝缘材料并具备加热和制冷功能，此外竖直或平放均可使用的设计使其成为极度可靠的半导体冰箱。

一体式低电压保护功能可防止冰箱耗尽汽车电池电量，从而确保您能安全开回家。

底部配备了两个坚固的滑轮，抽取式把手和方便手拎的侧把手，帮助您轻松灵活的转移精液。

该冰箱还可以通过220V适配器连接家用电源，方便室内使用；分离式盖子设计最大程度降低冷空气损耗，而可拆卸式内部隔间和电源线盒则便于您有序地存放物品。



420mm

380mm

基本参数

整体尺寸：L560*H420*W380mm

净重：8.4kg

额定功率：48W

容积：40L

工作电压：12V

产地：青岛

备注：此外还有容积20L和35L两种规格，使用方法无差。



560mm

注意事项

此手册包含预防性的安全措施及使用说明，在使用车载精液储存箱时必须严格的遵守，防止损坏箱体或伤害精液。另外此手册也介绍了如何避免损坏冰箱及其元器件。同时也在试图给出有益的合理化建议，从而使得你的精液储存箱效益最大化。

在首次使用冰箱前，应确保所有的使用者都学习了这本手册，并且完全学习并理解了安全条款。我们建议所有使用者都能随时随地的查阅此手册。

注意：手册中的信息，参数，图片和结构图可能会发生变更，且无需提前通知。




警告：这个符号表明如果误操作或者非正常操作有可能对冰箱或者其部件造成损坏。



第一章 使用说明

1.1 电源连接

(1) 在汽车上使用时，可直接将产品的烟插头电源线接入汽车上12V直流供电点烟插座中；如果汽车供电电源为24V，则需要连接专配的12V转24V电源转换器后才能使用。

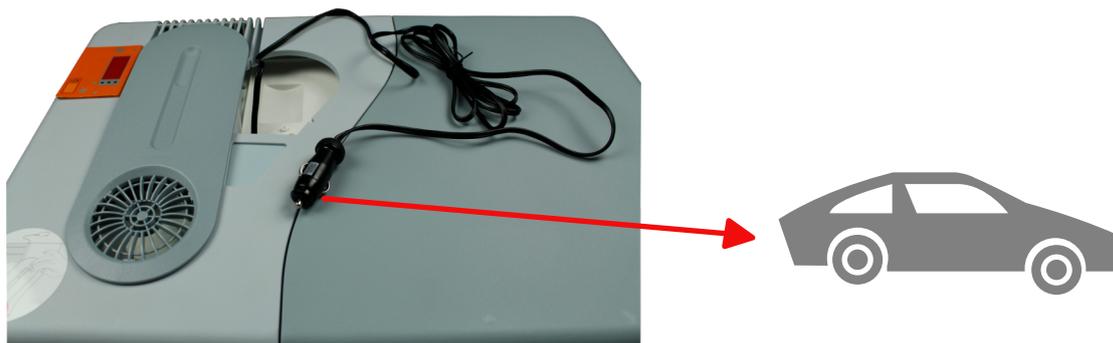

(2) 如果供电电源为220V交流电时，需选用我司专配的“交直流电源转换器”。使用时将交直流电源转换器的一端插头接交流电源开关，而带有点烟器的一端插入冰箱特定插孔。

1.2 使用环境温度

5°C-32°C，使用场所需空气流通，不要堵住上、下通风孔。


1.3 切勿将水注入箱体内部，如箱内有积水，应及时处理干净。

1.4 使用功率：48W

第二章 使用准备

1. 拆除所有包装组件

包括泡沫底座和胶带也必须拆除。

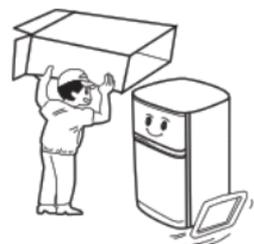

2. 清点随机附件和资料

箱内物品请按装箱单内容对照检查，如有出入请咨询经销商。




3. 清洁

使用前最好先进行清洁除去运输过程中可能滋生的细菌，和外界带入的病毒。



4. 静置

让精液储存箱静置一个小时以上，再接通电源。以确保正常运转。

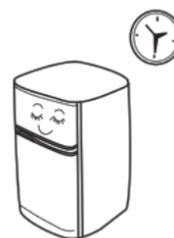


第三章 操作方法

1.连接电源

将交直流电源适配器的插头接入家用插座，将带有点烟器的一头插入冰箱特点插孔，此时电源适配器上的指示灯由绿变红，表示正在充电。

2.检查预设数据

首先看屏幕右下角显示的数值是否为17.0，如果不是可通过下方的“3”“4”进行调节，使其变为17.0。

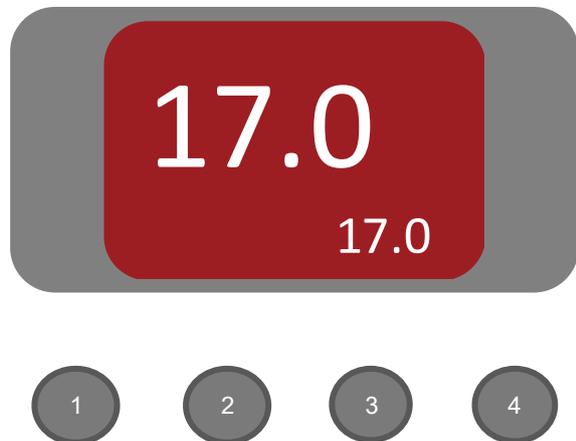

3.将精液放入储存箱中

经过两个小时左右的时间，当箱内温度基本稳定，就可以正常使用啦，把稀释好的精液放入。如果一次放入的量比较多，温度会有不同程度的回升这是正常的，稍等片刻就会回到正常的水平。



不可私自修改控制器数值，以免影响冰箱正常使用

第四章 维修和保养注意事项

1.箱体内需要定期清理，清理时请使用软布和中性清洁剂擦拭；

2.如长时间停用该产品，请先将箱体内部清洁干净，打开箱门或箱盖，待箱体内部干燥后再进行物品放置及保存。



半导体制冷产品在使用过程中会产生冷凝水，请定期清理冷凝水，以免影响使用效果。



请勿将纸质包装物品置于箱体底部储存，以免浸湿；保养和清洁冰箱时，请确保已经拔下电源线，关闭电源。



不要用手去触摸裸露在外的电源线，使用产品前需确保电源线和插头干燥！



产品运行期间，确保有足够的通风，要远离墙壁或其它物品的遮盖，保证空气流通。

第五章 常见问题及解答

1.精液储存箱充不上电?

观察交直流电源适配器的指示灯是否为红色，红色表示正常充电。若不是红色用力插牢带烟插头的一端再行观察；还有一种可能是烟插头坏了，联系生产商更换。

2.温度没有变化风扇在转但控制器不亮?

这个有可能是因为电压不稳导致控制器的适配器烧毁，请及时联系生产商处理。

3.夏天温度一直降不下来?

外界温度过高导致温度无法达到目标值,长按“2”出现“P1”再点击“3”调节到“P4”，再点击“2”把数字调节到5~20根据外界炎热的情况。然后断电半小时后开机。


4.显示温度和实际温度不同?

长按“2”出现“P1”再点击“3”调节到“P3”，如果实际温度18°C但是显示温度显示17°C那么就把数值调节到1，
实际温度-显示温度=需要调节的数值

第六章 售后保障

电路图

本图仅供参考，如有更新，恕不另行通知。以实物为准，最终解释权归本公司。

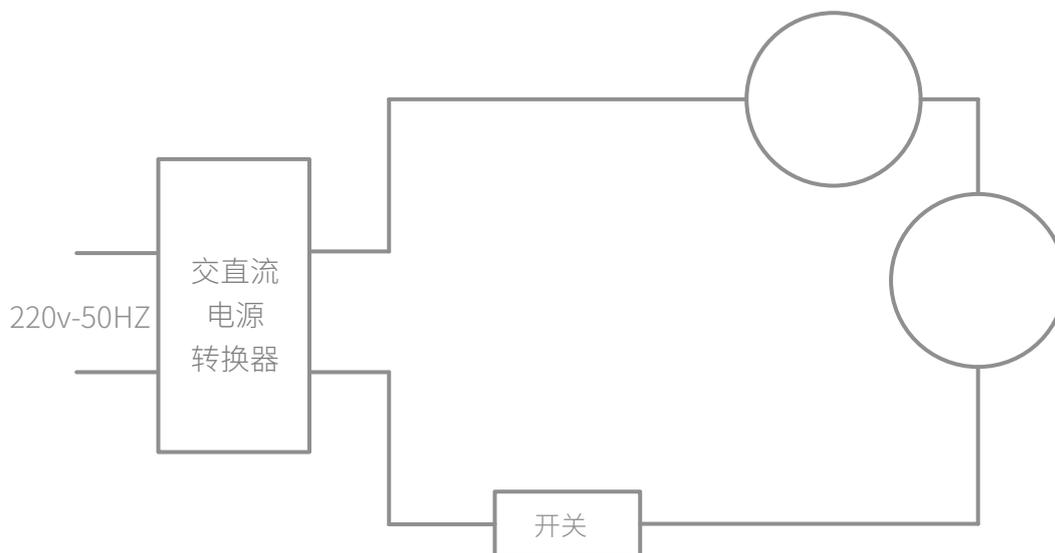

服务保证

每台zubaba产品均可享受长达1年的质量问题换新服务。如果您在使用中遇到问题，请致电我们的售后热线：

0532-88983400

如需转送本产品，请将本说明书随同转送。

产品升级，规格参数如有更新，恕不另行通知，实际产品的形式和颜色则可能与实物所显示略有不同，请以实物为准。

青岛东吉丰畜牧科技有限公司

QINGDAO DONGJIFENG FARM TECHNOLOGY CO.LTD.
地址：山东省青岛市城阳区后古镇工业园联东U谷6-402
全国售后服务热线：0532-88983400
网址：<http://www.pcp-ai.com>
邮箱：zubaba@zubaba.cn

退换货流程

联系售后，说明退换货原因，达成退换货协议

填好“售后服务卡”以及退换货原因（网购用户请写下宝贝订单号）：填写产品的信息，以及退换货人的姓名、电话和地址

请将产品及“售后服务卡”快递至达成协议的商家或厂家。
我们将以最快的速度为您提供退换货服务

收到您的退换货产品和“售后服务卡”，换货，我们将在2个工作日内寄回产品；退货，我们将在2个工作日内按照协议完成退款；维修产品我们将在15个工作日内回寄产品

网购用户收到换发产品后，请上线确认收货，完成交易

售后服务卡

订单编号	
退货原因	
希望我司如何处理：退货 <input type="checkbox"/> 换货 <input type="checkbox"/> 维修 <input type="checkbox"/>	
产品故障	
您的地址	
拍的账号	
退货明细	
您的姓名	
联系方式	