



IL SUNG P.C.P.

青岛东吉丰畜牧器材有限公司

# 使用说明书/ 保修卡

DJF-1700X50/X100

东吉丰精液恒温保存箱

- 请使用前仔细阅读说明书
- 请妥善保管，以备阅读
- 本产品适用于畜牧行业使用

# 目录

## DJF-1700X50/X100

### 使用之前

产品特点.....	2
安全注意.....	3
使用准备.....	4
开始使用.....	5

### 使用指导

精液保存注意事项.....	6
---------------	---

### 维护方法

疑问解答.....	7
装箱清单.....	8

### 售后资料

保修卡.....	9
欢迎访问东吉丰其他平台获取更多优惠.....	10




请使用前仔细阅读说明书

请妥善保管，以备阅读

如有问题请联系经销商

## 产品特点

- 韩国进口压缩机使用寿命长  
韩国原装进口,更高的品质,大大延长了使用的寿命和周期.
- 为精液保存贮藏专门设计  
通过设计和改进使箱内的温度更快更均匀的持续在 17°C,让精液有更舒适的保存环境.
- 超大储存空间,满足大型猪场需求  
超大空间,帮您应对大量采精时精液的储藏.

 禁止标志	凡带有该标志的内容,是必须禁止的行为,否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
 警示标志	凡带有该标志的内容,是关系到产品的安全使用和使用者的生命安全,必须严格按照要求操作,否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
 注意标志	凡带有该标志的内容,是使用者必须引起重视的部分,否则会因操作不当引起产品损伤会造成其它损失。

# 安全注意

<p>该系列冰箱使用交流220V/50Hz电源。若电压波动范围较大（超过187~242V的范围），有可能造成冰箱不启动，压缩机烧坏，或压缩机工作声音异常等故障，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。</p>  	<p>必须使用独立专用插座并进行可靠接地。本系列冰箱的电源线配有三线（接地）插头，与标准三线（接地）插座匹配。在任何情况下，切勿切除或拆除电源线的第三插脚（接地）。冰箱安装到位后，插头应可触及，以方便插拔，警示！电源线插头应保持与插座牢固接触，否则，可能导致火灾。</p>  	<p>不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。</p>  
<p><b>不要损坏电源线</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头，一定要紧紧握住插头，从插座中直接拔出。</li> <li>●不要让箱体压住电源线或人为踩踏电源线。</li> <li>●将冰箱移离墙壁时，请小心谨慎，切勿滚压或损坏电源线。</li> </ul>  	<p><b>当电源线损坏时</b></p> <p>当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿使用。电源线磨损或损坏，必须到厂家指定的维修点更换。</p>  	<p>请勿把瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以防冻裂。</p>  
<p><b>有煤气等易燃气体泄漏时</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●关闭气体泄漏的阀门，</li> <li>●打开门窗，</li> <li>●不要拔或插冰箱等电器件的电源插头。</li> </ul>  	<p><b>以下情况请拔下电源插头</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●清洁及维修前，请拔下冰箱的电源插头。</li> <li>●更换损坏的灯泡时，应拔掉冰箱的电源插头，以防触电。</li> </ul>  	<p>冰箱废弃不用时，请将门子卸掉，并拆下门封条，以免小孩子进入玩耍，发生意外。</p>  




注意

精液放置切勿直接接触箱内壁，最好垫上毛巾再放置精液。

## 使用准备

1. 拆除所有包装组件  
包括泡沫底座和胶带也必须拆除。

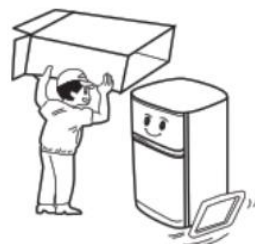


2. 清点随机附件和资料  
箱内物品请按装箱单内容对照检查，如有出入请咨询经销商。



3. 清洁  
使用前最好先进行清洁除去运输过程中可能滋生的细菌，和外界带入的病毒。



4. 静置  
冰箱放置调平·清洁完毕，先不要接通电源，让恒温箱静置一个小时以上，再接通电源。以确保正常运转。

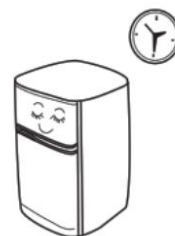

## 开始使用

### 1. 链接电源

### 2. 检查预设数据

点击“set”看显示的数值是否为 17.0

然后再按“set”回到室温的显示界面。

如果不是可通过下方的“up”“down”

进行调节，使其变为自己需要的温度。



### 3. 将精液放入恒温箱中

经过两个小时左右的时间，当箱内温度基本稳定，就可以正常使用啦，把稀释好的精液放入。如果一次放入的量比较多，温度会有不同程度的回升这是正常的，稍等片刻就会回到正常的水平。




注意

不可随意修改控制器数值如有需求请查阅（清洁维护）（疑问解答）

## 精液保存注意事项

1 保存温度不应低于 15℃，不高于 20℃，最佳保存温度为 17℃，让恒温箱在 17℃ 来保存精液，应注意不可将精液保存在普通冰箱中，因为普通冰箱冷藏室内最高温度为 8℃，而猪的精液的最低保存温度不能低于 14℃。也不宜将稀释后的精液保存在 20℃ 以上的室温下，即使室温在 15~20℃ 范围内，也最好不要在这种环境中保存，因为室温日夜变化太大，除非 24 小时内就使用，否则不能在这种环境下保存。适当降低保存温度有利于延长精子的存活期，减少代谢产物对精子的伤害。但温度不可低于 15℃，否则精子就会受到损伤。在各种动物中，猪的精子对温度的变化十分敏感，尤其是低温，其原因不详。猪的精子对较高保存温度（20~25℃）有一定的耐受力，如果保存时间在 12 小时内，精子活力不会受到什么影响。我们推荐的保存温度是 17℃，上下温差不超过 2℃。

2. 精液稀释分装后应尽可能在 72 小时内使用完平时要有经常检查保存精液精子活力的习惯。如果保存时间超过 48 小时用前应进行活力检查，一般稀释液如果精液的保存时间超过 72 小时，就应废弃。应该注意的是，自精液被稀释分装保存开始，在有效的保存时间内，精子的受精能力是逐步下降的，尽管精液保存 96 小时，受胎率仍没有明显降低，但在 72 小时用完，受胎率是十分可靠的，但是配合我们的精梦®长效稀释粉及稀释液，即可以保证最长一周的精子高活力·高受胎率生存。每天将精液摇匀两次在精液保存中，精子会沉淀到底部，每天应由工作人员分两次轻轻摇动或上下翻转输精瓶（袋），使精液再次混合后再放入保温箱中。

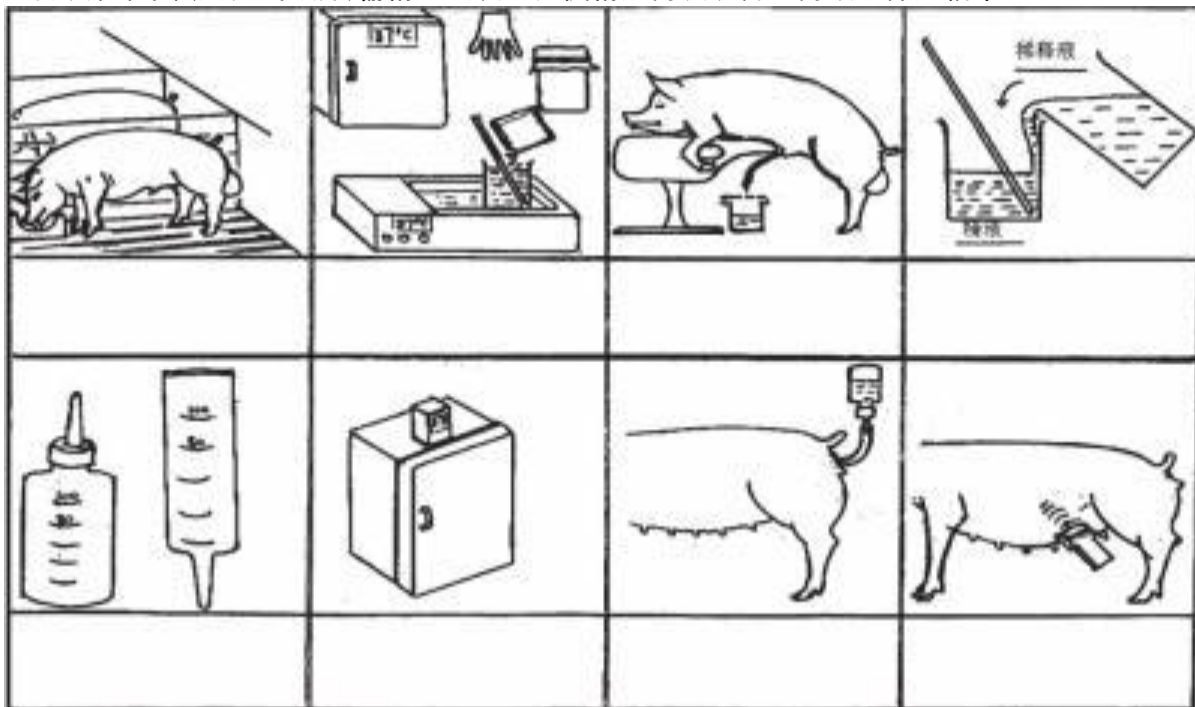

### 3. 如遇到紧急停电

如果恒温冰箱停电或出现故障，在适宜的室温条件下，即室温在 15~25℃ 内变化，可不必采取特殊措施，因为这种室温下，对精液的短期存放不会有太大影响。停电时间如果不超过 3 小时，一般也不会有太大问题。但如果气温高于 25℃ 或低于 15℃，则需要进行特殊处理。在冬季可将热水袋或输液瓶充入 50~70℃ 的热水用厚毛巾包好，放入冰箱中，使其缓慢散热；在夏季，则可用袋装冰块（可用普通冰箱制冰），同样用毛巾包好，放入冰箱中。每 2 小时观察一次箱内温度，使箱内温度在 16~20℃ 之间，如果温度不合适，应调整水温或增减外部隔热材料的厚度，以控制散热或吸热的速度。

## 疑问解答



问题：温度一直偏差大温度下不来或是上不去？

解答：首先点“set”查看预设温度是否正确，如果无误再按“set”返回实际温度。然后长按“set”出现“P0”再点击“set”，出现数值后点击“up”或是“down”调节至 0.6~0.3.

问题：温度没有变化风扇在转但是控制器不亮？

解答：这个有可能是因为电压不稳导致的控制器的适配器烧毁，请及时联系经销商处理。

问题：夏天温度一直降不下来？

解答：外界温度过高导致温度无法达到目标值，长按“set”出现“P0”再点击“up”调节到“P3”，再点击“set”把数字调节到 5~20 根据外界炎热的情况。然后断电半小时后开机

问题：显示温度和实际温度不同？

解答：长按“set”出现“P0”再点击“up”调节到“P1”，如果实际温度 18°C但是显示温度显示 17°C那么就把数值调节到 1，

实际温度-显示温度=需要调节的数值



# 装箱清单

名称 型号	说明书	置物板	纸箱包装	其他配件
DJF-1700X50	1	1	1	
DJF-1700X100	1	2	1	



IL SLING PCP

青岛东吉丰畜牧器材有限公司

合格证

Certificate of Quality

检验员:

● 最终解释权归青岛东吉丰所有



IL SUNG PCP

青岛东吉丰畜牧器材有限公司

编号:

# 东吉丰产品保修卡

\*使用方法上的说明以及产品制作有关的事项不属于损失赔偿内容

### 修理内容及确认

日期	修理内容	确认

## 产品保证书

产品名			保证期	整机: 从购买日起1年内 主要零部件: 从购买日起3年内			
型号			客户	姓名		身份证号	
出厂编号				住址			
销售处	购买日期	年 月 日		电话	住宅:	公司:	
				备注			
	电话						

地址: 青岛市城阳区夏装长街道东古镇工业园

电话: 400-021-0511

邮编: 266100



0017005110026



# IL SUNG PCP

青岛东吉丰畜牧器材有限公司

进入东吉丰淘宝享受更多优惠



扫描二维码，关注店铺随时掌握  
优惠动态！！