

zubaba



# Needle free syringe

电动无针头注射器说明书

JDF-25

感谢阁下回顾本公司产品，使用前敬请仔细阅读说明书！

Reed instriation manual carefully before use

## 简介

你选择了**zubaba**电动无针头注射器


相较于传统的普通针头注射，药液喷射面积更广，起效更明显；同样超前的充电式设计可以保障疫苗注射更加高效便捷。

高效锂离子电池可以保障无间断注射疫苗1000次以上。

### 收益最大化

更少的成本  
自动的操作  
安全的材质  
稳定的使用

## 产品规格:

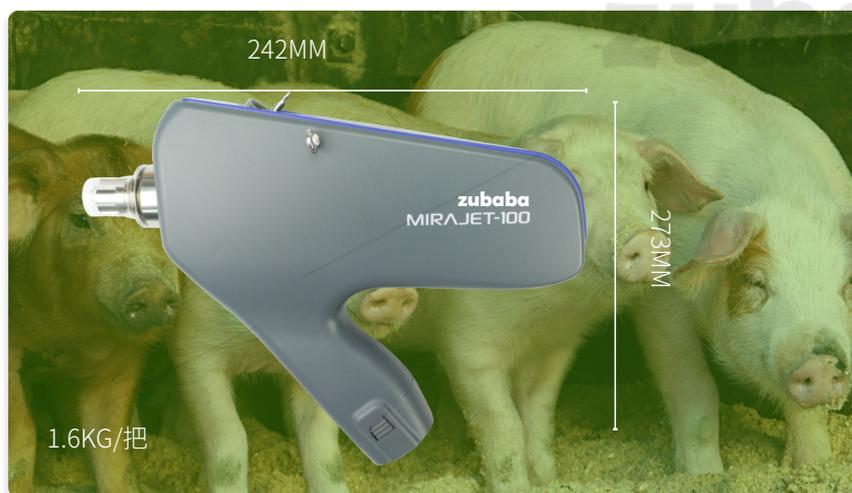

注射剂量 0.2ml

重 量 1.25KG

驱动方式 发动机+弹簧

电 源 14.8V/2100mah锂离子充电

喷射次数 >1000次

尺 寸 273\*242\*64MM

配 件 注射器、电池、充电器、塑料瓶罩

注射对象 猪

zubaba

细节展示

zubaba

## 便携式套装

内含注射器一把、充电器一个、电池一个、塑料瓶罩一个挂绳一个。



SAFE AND FREE OF INFECTION

# 安全·无感染

无针头接触，生猪间无交叉感染，操作者不存在针扎风险。



zubaba

## 驱动方式

通过弹簧按压接触加电机驱动完成注射



zubaba

zubaba



## 1000次 EASY

选用2100毫安锂电池，满电轻松完成千次注射，一切都是那么便捷。

zubaba

## 注射流程



1.将电池插入注射器



4.长按P键2秒左右，机器开机



2.将药物导引自上而下插入扭紧



5.按一下M键，启动注射功能，屏幕上显示的数字为注射次数



3.将药瓶插入针头，压实



6.开始注射，一般为颈部注射，找准位置垂直接触皮肤按压，通过弹簧+电机驱动完成一次注射

## 清洗维护



1.取下药瓶，再一次按下M键进入清洗功能



2.选用苯甲醇洗涤液进行机器清洗，将其压紧在针头上



3.手动推拉机器，释放出药物和洗涤液（10次以上）。然后取下洗涤瓶，再推拉五次机器即可完全清洗干净。

## 售后

### 服务保证

每台zubaba产品均可享受长达1年的质量问题换新服务。如果您在使用中遇到问题，请致电我们的售后热线：

**0532-88983400**

如需转送本产品，请将本说明书随同转送。  
产品升级，规格参数如有更新，恕不另行通知，实际产品的形式和颜色则可能与实物所显示略有不同，请以实物为准。

### 青岛东吉丰畜牧科技有限公司

QINGDAO DONGJIFENG FARM TECHNOLOGY CO.LTD.

地址：山东省青岛市城阳区成康路328号甲6号楼402室

全国售后服务热线：0532-88983400

网址：<http://www.pcp-ai.com.com>

邮箱：[zubaba@zubaba.cn](mailto:zubaba@zubaba.cn)



订单编号	
退货原因	
希望我司如何处理：退货 <input type="checkbox"/> 换货 <input type="checkbox"/> 维修 <input type="checkbox"/>	
产品故障	
您的地址	
拍的账号	
退货明细	
您的姓名	
联系方式	