

zubaba



Needle free syringe

电动无针头注射器说明书

JDF-25

感谢阁下回顾本公司产品，使用前敬请仔细阅读说明书！

Reed instriation manual carefully before use

简介

你选择了**zubaba**电动无针头注射器


相较于传统的普通针头注射，药液喷射面积更广，起效更明显；同样超前的充电式设计可以保障疫苗注射更加高效便捷。

高效锂离子电池可以保障无间断注射疫苗1000次以上。

收益最大化

更少的成本
自动的操作
安全的材质
稳定的使用

产品规格:

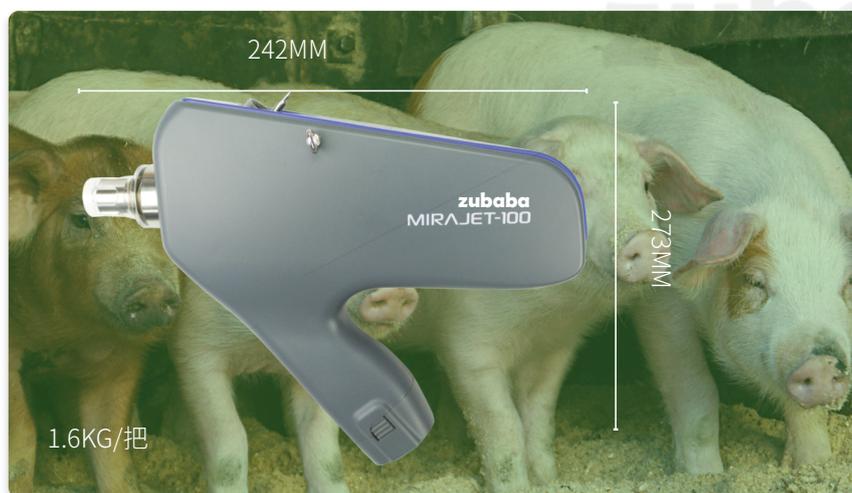

注射剂量 0.5ml

重 量 1.6KG

驱动方式 发动机+弹簧

电 源 14.8V/2100mah锂离子充电

喷射次数 >1000次

尺 寸 273*242*64MM

配 件 注射器、电池、充电器、塑料瓶罩

注射对象 猪

配件清单

zubaba



主机1台



药瓶适配器1个



电池1个



电池适配器1个





肩带1根



定制包装箱1个

产品概述

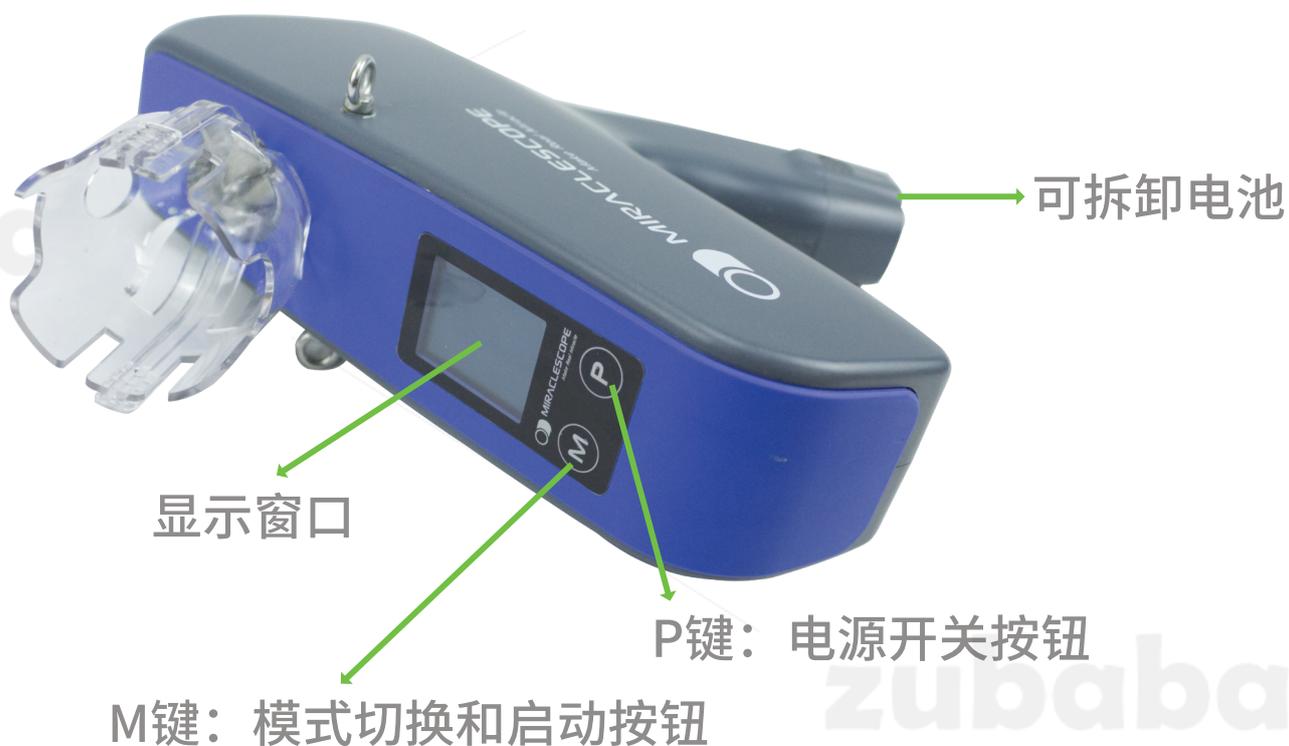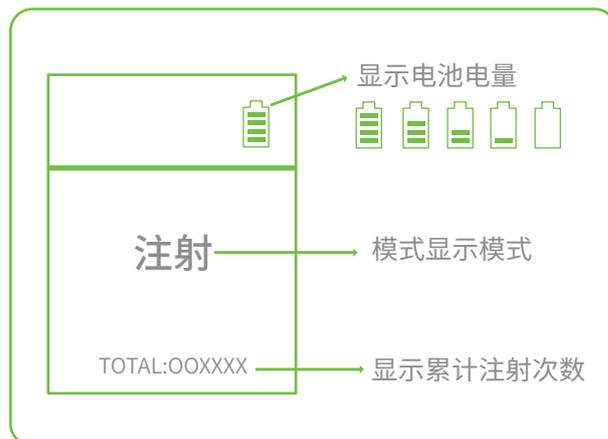

启动顺序



1. 将电池插入注射器



2. 长按P键3秒左右，机器开机



3. 将药瓶自上而下插入扭紧



4. 长按M键3秒进入选择模式，有三种可供切换。
(1) 注射模式：连续注射模式
(2) 清洗模式：注射器清洗模式
(3) 重置模式：初始化当前注射次数



5. 长按P键3秒左右即可关机



6. 将电池从机器上分离出来

清洗维护



1.注射完毕后，尽快装上专用清洗液瓶，启动清洁模式以清除气缸内的任何异物包括注射液。



2.选用苯甲醇洗涤液进行机器清洗，将其压紧在针头上



3.手动推拉机器，释放出药物和洗涤液（10次以上）。然后取下洗涤瓶，再推拉五次机器即可完全清洗干净。

模式说明

注射模式

1. 长按M键3秒切换到注射模式



2. 短按M键启动注射模式



3. 按压触发器，达到连续注射

清洗模式

1. 长按M键3秒切换到清洗模式



2. 将洗涤液安装在药槽上
3. 按下清洗液上膛
4. 按下触发器，喷出洗涤液
5. 反复触发5-10次清洗



重置模式

1. 长按M键3秒切换到重置模式



2. 短按M键启动重置模式



现在注射次数重置为“0”

使用须知



本产品是兽用医疗器械，禁止用于人体。



要充分阅读使用说明书，准确地掌握使用方法后再进行使用。



本产品一次注射剂量为0.5ml。



注射时，请将扳机垂直按在猪的皮肤表面，斜压可能无法正常注射药物或疫苗。



禁止空打：不要在不装药瓶或洗涤液的情况下发射。发射冲击可能会导致机器的损伤。



请勿随意拆装，可能导致机器故障或性能下降。



前臂内侧的零件脱离可能会导致针液泄露，清洗完注射器后请不要用高压空气烘干。



润滑剂、甘油会缩短配件的寿命，请不要使用。

细节展示



便携式套装

内含注射器一把、充电器一个、电池一个、塑料瓶罩一个挂绳一个。



zubaba

驱动方式

通过弹簧按压接触加电机驱动完成注射



zubaba

CHARGING DESIGN

1000次 EASY

选用2100毫安锂电池供电，满电可轻松完成千次注射，一切都是那么便捷。



1000次 EASY

选用2100毫安锂电池，满电轻松完成千次注射，一切都是那么便捷。

zubaba

售后

服务保证

每台zubaba产品均可享受长达1年的免费售后服务。如果您在使用中遇到问题，请致电我们的售后热线：

0532-88983400

发生下列情况时，我们可以提供有偿售后服务：

1. 用户使用不慎，发生故障
2. 因不当修理而导致的故障
3. 因自然灾害（火灾、水灾）发生故障

青岛东吉丰畜牧科技有限公司

QINGDAO DONGJIFENG FARM TECHNOLOGY CO.LTD.

地址：山东省青岛市城阳区成康路328号甲6号楼402室

全国售后服务热线：0532-88983400

网址：<http://www.pcp-ai.com.com>

邮箱：zubaba@zubaba.cn



订单编号	
退货原因	
希望我司如何处理：退货 <input type="checkbox"/> 换货 <input type="checkbox"/> 维修 <input type="checkbox"/>	
产品故障	
您的地址	
拍的账号	
退货明细	
您的姓名	
联系方式	