



运高背膘仪说明书

感谢阁下回顾本公司产品，使用前敬请仔细阅读说明书！

Read instruction manual carefully before use

简介

你选择了运高背膘仪

RENCO 背膘仪是利用超声波来测量有 1, 2 或 3 层背膘的动物的背膘厚度, 背膘厚度测量范围在 4—35 毫米。层次连接选择有 1, 2, 3 层背膘。该仪器为测量背膘的总厚度而设计。

轻便、易提、全金属外壳且有可多次充电的电池, 只需要按一个键就可以操作。有 1、2 和 3 各个层次背膘测定的连接。

产品规格:



重量: 500g

尺寸: 70*112*24mm

续航: 5小时连续使用

探头频率: 2.5MHz

充电时间: 3小时

探头线: 一般型探头线

充电器1个

测量校准模块1个

耦合剂分装塑料瓶1个

使用方法

1.开机即测，第一次使用之前，请保证已连续充电12小时。每天的充电时间要比当日使用该仪器的时间应长3倍，这样能延长电池的使用寿命。

2.如何找到最佳测量位置：将手放在猪的侧部，从猪的前方开始向后，找到最后一根肋骨，在猪背脊骨任意一边，距背脊骨65毫米的地方就是测量点，测量时需要在猪的皮肤上涂润滑液，已达到探头和皮肤的良好接触，从而使超声波更好的进入猪的体内并反射回来。

3.首先按下"POWER"按钮，将探头与猪的皮肤接触，并轻柔的按压探头，以挤出探头与皮肤之间的空气。另外，在探测的整个过程中，请保证探头与皮肤始终保持垂直。（小窍门：用食指与中指夹住探头更方便操作。）

如仪器显示屏幕左侧的红灯变亮，显示屏幕会直接显示出数值。如果红灯不亮，说明探头与皮肤的接触不好，需要再涂抹一些润滑剂，并且要保证探头与皮肤间没有空气，同时探头与皮肤保持垂直并延长探测时间。

每一层脂肪层并不是都一样厚，因此，取临近的几点测量出的多个数值的平均值，更接近准确的结果。

注意：刚按下“POWER”按钮时所显示出的数值是无效的，只有当“READ”灯变亮的时候，测量才正式开始。

测量结果误差：±1毫米，测量范围：5毫米-35毫米。

4.对于有一些年老猪的有坚韧死皮的部位，就需要找到位于其下层的活性组织后进行测量，最好在测量之前，除去测量部位的毛发，用热水热敷该部位，然后涂抹一些油，过两分钟后，再进行测量。而对于年龄不大的猪，就不需要以上的步骤了。

细节展示



· FND显示屏，即使在暗处轻松读数



· 坚固铝合金材质可防止碰撞引起的损坏



- 可充电锂电池，三小时充电可连续工作5小时以上，电池使用寿命在2年以上。



- 一次可同时测量和显示1.2.3层脂肪。

1.测量时，测试部位需使用足够的液体如油或是水。测量时使用不足的液体是常见的错误。（对于猪来说，开始测量时需设定为3层，除非知道只有2层），打开电源开关，把探头放于测试部位，轻轻的按压以挤掉皮肤与控头之间的空气，重要的是要使探头与背部垂直，如果探头有个角度的话，就会很容易出现错误，许多人发现当把探头放置在食指和中指之间的时候，最容易操作。

2.如果找到正确的脂肪层，READ（读数）指示灯就会亮。如果 READ 指示灯没有亮，表明探头与皮肤之间接触地不够紧密，就要多用一点油。尽力挤掉空气泡，因为超声波不能穿透空气。确保探头与动物的背部保持垂直。探头的固定对于获得比较稳定的结果是很重要的。

3.电池：电池是环保的，经过处理后不需要再利用。RENCO NMH 电池是利用特殊的元件做成的，只能使用 RENCO 的电池更新，以免损坏和缩短机器的使用寿命。如果用其他的电池而不是 RENCO 电池更换的话，就无法得到质量保证。更换电池时，去掉盖子，拧松连接层的螺母。拔出电池，换上新的，然后把盖子盖上。如果停止测量超过 2 分钟，仪器会自动关闭，这样可以避免仪器自动放电，当仪器被不注意打开时候。



售后

服务保证

每台zubaba产品均可享受长达1年的质量问题换新服务。如果您在使用中遇到问题，请致电我们的售后热线：

0532-88983400

如需转送本产品，请将本说明书随同转送。

产品升级，规格参数如有更新，恕不另行通知，实际产品的形式和颜色则可能与实物所显示略有不同，请以实物为准。

青岛东吉丰畜牧科技有限公司

QINGDAO DONGJIFENG FARM TECHNOLOGY CO.LTD.

地址：山东省青岛市城阳区成康路328号甲6号楼402室

全国售后服务热线：0532-88983400

网址：<http://www.pcp-ai.com.com>

邮箱：zubaba@zubaba.cn



订单编号	
退货原因	
希望我司如何处理：退货 <input type="checkbox"/> 换货 <input type="checkbox"/> 维修 <input type="checkbox"/>	
产品故障	
您的地址	
拍的账号	
退货明细	
您的姓名	
联系方式	